


# Co je třeba vědět – optimální hygiena a péče

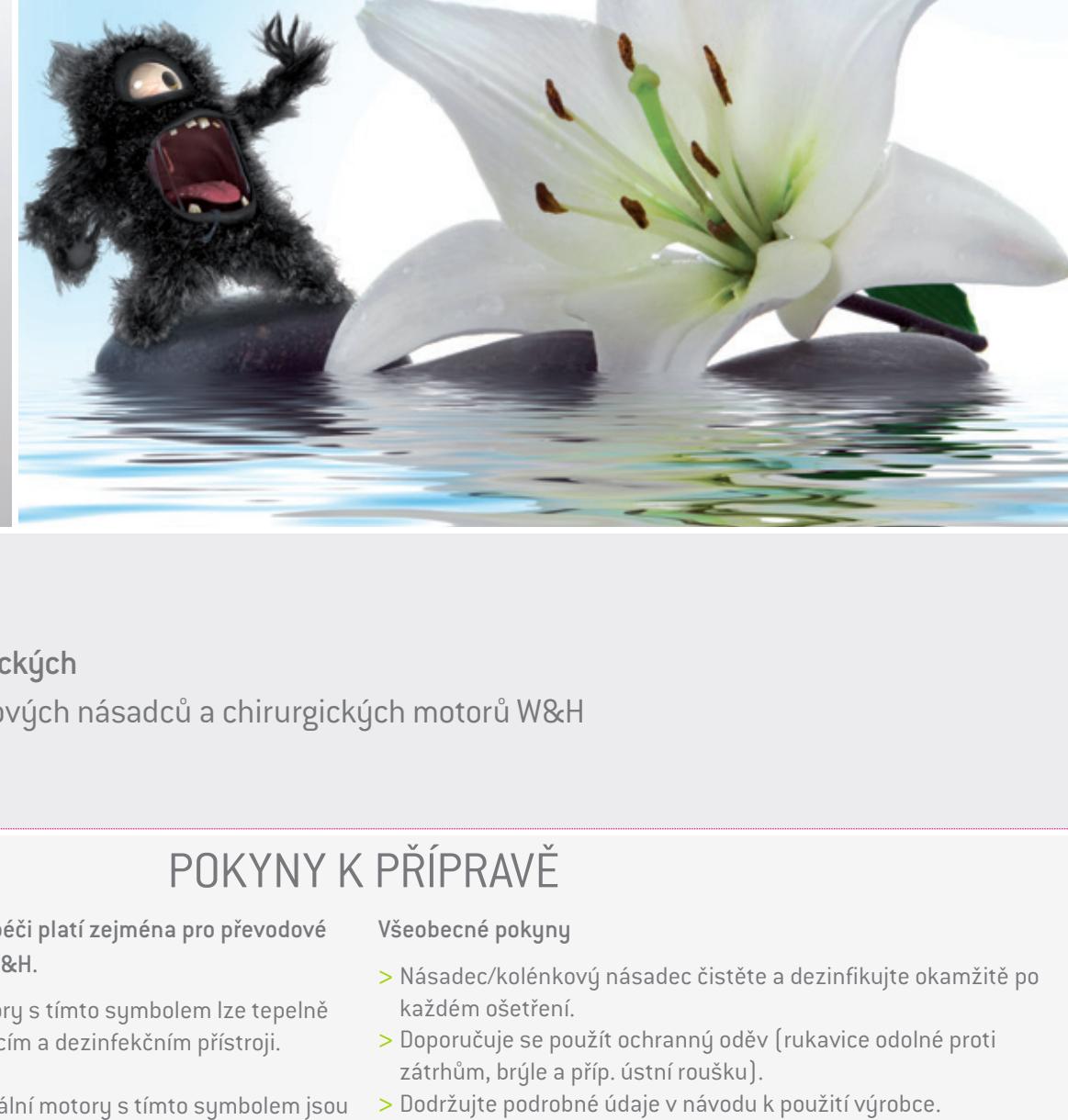

## Příprava chirurgických násadů/kolénkových násadů a chirurgických motorů W&H

### POKYNY K PŘÍPRAVĚ

Tato doporučení pro hygienu a péči platí zejména pro převodové nástroje a chirurgické motory W&H.

Převodové nástroje a motory s tímto symbolem lze tepelně čistit a dezinfikovat v čisticím a dezinfekčním přístroji.


Převodové nástroje a dentální motory s tímto symbolem jsou schváleny pro sterilizaci.

#### Všeobecné pokyny

- > Násadec/kolénkový násadec čistěte a dezinfikujte okamžitě po každém ošetření.
- > Doporučuje se použít ochranný oděv (rukavice odolné proti zátrhům, brýle a příp. ústní roušku).
- > Dopravujte podrobné údaje v návodu k použití výrobce.
- > Pro převodové nástroje a chirurgické motory W&H používejte certifikované a přezkoušené dezinfekční prostředky a dodržujte příslušné dávkování a dobu působení.  
Použité dezinfekční prostředky nesmí obsahovat chlór.
- > Pro pohon používejte čistý a suchý vzduch.
- > Společnost W&H doporučuje použití demineralizované vody.
- > Dbejte podrobných informací uvedených na stránce wh.com

1

### PŘÍPRAVA

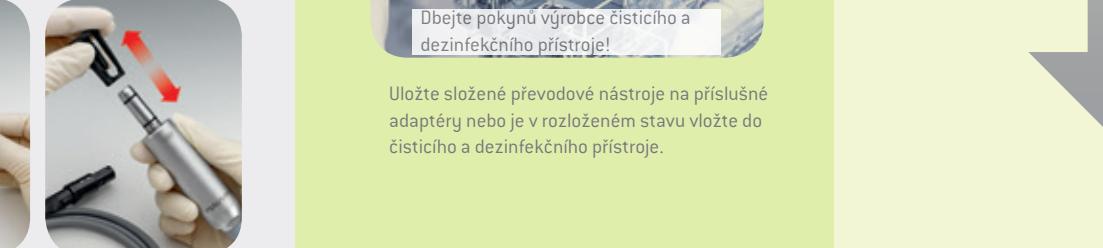

2

### ČIŠTĚNÍ / SUŠENÍ

Ručně



Strojově




1

2

3

### DEZINFEKCE / SUŠENÍ

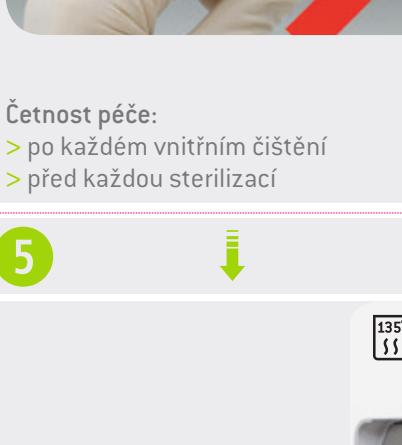

Dbejte pokynů výrobce čisticího a dezinfekčního přístroje!

Uložte složené převodové nástroje na příslušné adaptéry nebo je v rozloženém stavu vložte do čisticího a dezinfekčního přístroje.


Vizuální kontrola

3

4

### PROMAZÁNÍ

Ručně

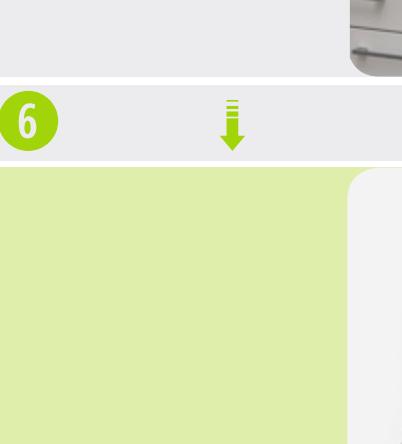

Strojově



4

5

### BALENÍ / STERILIZACE



Společnost W&H doporučuje používat sterilizátory v souladu s normou EN 13060. Zkontrolujte, zda jsou ošetřené položky po termodezinfeckci/sterilizaci suché.


5

### VYJMUTÍ



6

### ULOŽENÍ

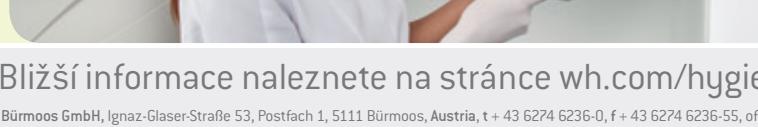

7

Blížší informace naleznete na stránce [wh.com/hygiene](http://wh.com/hygiene)

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1, 5111 Bürmoos, Austria, t +43 6274 6236-0, f +43 6274 6236-55, office@wh.com wh.com

07/2012 ACP Rev. 001

Bez prachu, čisté a suché.