

#whsterilization



video.wh.com

Nyní u vašeho
autorizovaného prodejce
nebo na **wh.com**



be pro



Profesionální ochrana
Dezinfekční & čistící přípravky W&H

BePro pro dokonalé čištění a dezinfekci

BePro chrání lidi před infekcemi a materiály před kontaminací. V závislosti na pracovním nebo ošetřovacím postupu musí být v každodenním provozu zubní ordinace povrchy, nástroje, stomatologické soupravy, a dokonce i ruce nezávadně čišťeny a dezinfikovány.

Nabídka hygienických prostředků BePro od společnosti W&H uspokojí veškeré hygienické potřeby v zubní ordinaci.

BePro – mimořádná účinnost, efektivita a snášenlivost s materiály

Účinnost

- › Široké spektrum patogenů: baktericidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní
- › Silný čisticí a dezinfekční účinek
- › Testováno a v souladu s normami EN

Efektivita

- › Extrémně krátká doba působení
- › Praktické produkty vše v jednom (čištění a dezinfekce)
- › Nízký poměr ředění pro koncentráty

Snášenlivost s materiály

- › Vynikající a ověřená snášenlivost s materiály, i u citlivých povrchů (vč. umělé kůže a plexiskla)
- › Šetrné k pokožce a dermatologicky testováno
- › Doplnitelné balení



BePro – odsávací systémy

- Čištění, dezinfekce a péče o odsávací systém a plivátko na stomatologické soupravě.



BePro – péče o ruce

- Čištění a péče o ruce pro zdravou pokožku.



BePro – povrchy

- Čištění a dezinfekce
- › neinvazivních zdravotnických prostředků, např. stomatologických souprav vč. polstrovaných ploch a vnějších částí kolének a násadců, a také okolí pacienta.
- › velkých ploch, např. pulty recepce, čekárny, podlahy, kliky, dveře.



BePro – nástroje

- Dekontaminace zubařských nástrojů, např. scalery, sondy, nůžky, pinzety, vrtáky, pilníky.



BePro – automatické čištění nástrojů

- Přípravky pro termodezinfektory jako jsou W&H Thed+ a Thed.

BePro
Povrchy

Důkladné čištění a dezinfekce všech povrchů je důležitou součástí hygienických postupů. Produkty na povrchy BePro nabízí komplexní ochranu pro neinvazivní zdravotnické prostředky a jiné povrchy.



Produkty vše v jednom s širokým spektrem účinnosti
Produkty na povrchy BePro vše v jednom čistí a dezinfikují povrchy v jediném kroku. Výrobky jsou navíc nejen plně virucidní, ale mají také široké spektrum účinnosti proti bakteriím a plísním.

Snášelivé s materiály a rychlé
Díky své vynikající snášelivosti s materiály se tyto produkty hodí k čištění a dezinfekci nejrůznějších povrchů, jako např. mobiliář, obrazovky a umělá kůže, i k vnějšímu čištění a dezinfekci kolének a násadců. Čištění a dezinfekci povrchů tak lze provádět nejen snadno, ale i velmi rychle. Velkou výhodou produktů na povrchy BePro je jejich rychlá účinnost, např. plně virucidní již za 60 sekund a účinný proti koronaviru již za 15 sekund.



BePro Disinfectant Spray
Čistící prostředek na plochy připravený k použití k rychlé dezinfekci a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků. S lehkou ovocnou vůní.
› Účinné proti více než 100 patogenním mikroorganismům
› Účinkuje již za 15 sekund, maximální účinnost za 60 sekund
› Vhodné pro 250 materiálů, včetně umělé kůže
› Nízký obsah alkoholu pod 50 %

Složení u 100 g
20 g ethanolu, 28 g 1-propanolu, 0,056 g kvartérních amoniových sloučenin, pomocné látky a voda
V souladu s normami
EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 a EN 16615
Balení
› Plnitelná láhev 1 l s rozprašovačem
› Kanistr s náhradní náplní 5 l

BePro Disinfectant Wipes
Vlhčené ubrousky s citrónovou vůní k dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.
› Účinné proti více než 100 patogenním mikroorganismům
› Účinkuje již za 15 sekund, maximální účinnost za 60 sekund
› Vhodné pro 250 materiálů, včetně umělé kůže a plexiskla
› Nízký obsah alkoholu pod 50 %
› Po zaschnutí nezanechávají stopy
› Dermatologicky testováno

Složení u 100 g
31,3 g ethanolu, 16,7 g isopropanolu, pomocné látky a voda
V souladu s normami
EN 13624, EN 13727, EN 14476 a EN 16615
Balení
› 120 ubrousků v plnitelné plastové nádobě
› 120 ubrousků v plnitelném měkkém obalu

Odolnost patogenů vůči dezinfekčním prostředkům												
Mikrobiální aktivita ¹	Hepatitida (B, C)	HIV	BVDV	Koronavirus	Baktericidní	Levurocidní	Fungicidní	Obalené viry	Omezeně virucidní	Virucidní	Tuberkulocidní	Mykobaktericidní
BePro Spray	15 s	15 s	15 s	15 s	60 s	60 s	60 s	15 s	60 s	60 s	60 s	60 s
BePro Wipes	15 s	15 s	15 s	15 s	60 s	60 s	60 s	15 s	60 s	60 s	60 s	60 s

(1) Úplné spektrum účinnosti je k nalezení v technických datových listech.



BePro Disinfectant Concentrate
K dezinfekci a čištění citlivých a odolných velkých ploch (např. neinvazivní zdravotnické prostředky a také podlahy, kliky, dveře atd.).
› Účinné proti více než 100 patogenním mikroorganismům
› Účinkuje již za 60 sekund, maximální účinnost za 5 minut
› Účinný proti bakteriím, kvasinkám a virům
› Vylepšený poměr cena-výkon
› Vynikající snášelivost s materiály
› Jednoduché použití
› Biologicky odbouratelný

Složení u 100 g
10 g kvartérních amoniových sloučenin, pomocné látky a voda
V souladu s normami
EN 13624, EN 13727, EN 14476 a EN 16615
Ředící poměr
1 % (100 l tekutiny připravené k použití)
Balení
› Láhev 1 l

Odolnost patogenů vůči dezinfekčním prostředkům												
Mikrobiální aktivita ¹	Obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, korona)	BVDV	Chřipkový virus A	Herpes simplex virus	Bakterie odolné vůči antibiotikům	Baktericidní	Levurocidní	Kvasinky odolné vůči antibiotikům	Vaccinia virus	Omezeně virucidní	Adenovirus	Norovirus
BePro Concentrate	5 min	5 min	5 min	5 min	60 s	60 s	60 s	15 s	5 min	5 min	60 s	5 min

(1) Úplné spektrum účinnosti je k nalezení v technických datových listech.

BePro
Nástroje

Neuvěřitelně rychlé, šetrné při použití a s nekompromisním účinkem. U dezinfekce stomatologických nástrojů sází společnost W&H pouze na prostředky s mimořádně účinnými složkami.



Neuvěřitelně krátká doba působení
Produkty na nástroje BePro zajišťují absolutně bezpečnou a hygienickou nezávadnou dezinfekci a čištění již po neuvěřitelně krátké době působení. BePro Disinfectant R, roztok připravený k použití na dekontaminaci a čištění zubařských rotačních nástrojů, má například plně virucidní účinek již za 30 sekund. Vynikající snášenlivost s materiály navíc zajišťuje dlouhou životnost nástrojů.



BePro Disinfectant I
Silný dezinfekční koncentrát na zdravotnické a zubařské nástroje.
› Účinné proti více než 100 patogenním mikroorganismům
› Účinkuje již za 5 minut
› Plně virucidní během 15 minut
› 2 litry koncentrátu vystačí na 100 l roztoku připraveného k použití
› Vynikající snášenlivost s materiály
› Vhodný k použití v ultrazvukových čistících zařízeních

Složení u 100 g	V souladu s normami	Ředící poměr	Balení
9,1 g alkylaminu, 3,6 g didecyldimethylammoniumchloridu, ochranný prostředek proti korozi, pomocné látky a voda	EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562 a EN 14563	2 % (100 l tekutiny připravené k použití)	› Láhev 2 l



BePro Disinfectant R
Roztok připravený k použití k dezinfekci a čištění rotačních zubařských nástrojů.
› Účinné proti více než 100 patogenním mikroorganismům
› Účinkuje již za 15 sekund, maximální účinnost za 60 sekund
› Plně virucidní během 30 sekund
› Vysoce účinný i v případě přítomnosti krve a proteinů
› Obsahuje ochranný prostředek proti korozi
› Časově úsporné použití

Složení u 100 g	V souladu s normami	Balení
32 g isopropanolu, 0,7 g 2-phenoxyethanolu, 0,2 g kvartérních amoniových sloučenin, ochranný prostředek proti korozi, pomocné látky a voda	EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 a směnicemi RKI/DVV	› Láhev 1 l › Kanistr s náhradní náplní 5 l

Odolnost patogenů vůči dezinfekčním prostředkům

Mikrobiální aktivita¹	Obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, koróna)	BVDV	Chřipkový virus A	Herpes simplex virus	Bakterie odolné vůči antibiotikům	Baktericidní	Yeasticidal	Antibiotic-resistant yeasts	Levurocidní	Tuberkulocidní	Adenovirus	Norovirus	Poliovirus	Mykobaktericidní	Fungicidní	Polyomavirus
BePro Disinfectant I	5 min	5 min	60 sec	5 min	5 min	5 min	5 min	5 min	15 min	5 min	5 min	10 min	15 min	5 min	-	-
BePro Disinfectant R	15 s	15 s	15 s	15 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	60 s	30 s	30 s	30 s	60 s	60 s	30 s

(1) Úplné spektrum účinnosti je k nalezení v technických datových listech.

BePro soaking bath

Odolná plastová nádoba pro dekontaminaci nástrojů ponořením.



BePro automatické čištění nástrojů



Maximální výkon při použití termodezinfektorů. BePro přináší komplexní řešení všech chemických prostředků pro přístroje na čištění a dezinfekci jako jsou W&H Thed+ a Thed.

Vynikající čištění a snášenlivost s materiály

Perfektně sladěná produktová paleta přesvědčí vynikajícím čistícím účinkem a snášenlivostí s materiály. K dispozici s alkalickými nebo tri-enzymatickými čistícími prostředky.

BePro Cleaner TE

Tri-enzymatický, nepěňivý čistící prostředek k automatickému čištění v čistícím a dezinfekčním přístroji.

- Tri-enzymatický tekutý čistič
- › Nepěňivý čistící prostředek
 - › Neobsahuje CMR
 - › Vhodný k použití v ultrazvukových čističích
 - › Vhodný pro celou řadu materiálů
 - › Obzvláště vhodný k použití na kolénka a násadce

Složení

Neiontové tenzidy, enzymy (proteáza, amyláza, lipáza), sekvstranty, barvicí látky

Balení

- › Kanýstr 5 l
- › Náplň 1,5 l (vhodná pro stolní přístroje Thed+, Thed)



BePro Cleaner MA

Nepěňivý roztok se změkčujícím čistícím účinkem. Odstraňuje různé sekrety, proteiny, tuky, biologické reagenty a organické sloučeniny, které se usazují na nástrojích a skleněných nádobách.

- Alkalický čistící prostředek
- › Odstraňuje nečistoty různého druhu ze skleněných nádob běžně používaných v laboratořích
 - › Vhodný k použití v ultrazvukových čističích
 - › Vhodný pro celou řadu materiálů
 - › Zaručená účinnost, i v případě tvrdé vody
 - › Není vhodný k použití na násadce, popř. na hliník všeobecně

Složení

Sekvestranty, neiontové tenzidy, hydroxid draselný, další pomocné látky

Balení

- › Kanýstr 5 l



BePro Neutraliser C

Skvělý na oplachování skleněných nádob. Odvápňovací účinek: Receptura založená na sloučenině organických kyselin má dvojnásobný účinek proti usazeninám vodního kamene. Rozpouští existující usazeniny vodního kamene a působí proti vytváření nových usazenin. Neutralizační účinek: Kolísání teplot a mechanické oplachování způsobují neutralizaci ionizovaných skleněných povrchů. Účinek oplachování: Zbytky čistící pěny se rozpustí, což usnadňuje průběh oplachování.

- Kyselá oplachovací tekutina
- › Neutralizační účinek
 - › Účinek oplachování
 - › Dvojitý odvápňovací účinek

Složení

Organické kyseliny

Balení

- › Kanýstr 5 l



BePro Rinse

Rychlé vysoušení beze skvrn během automatického čištění zubních nástrojů.

Složení

Neiontové tenzidy, urychlovače oplachování a schnutí, sekvstranty


Balení

- › Láhev 1 l
- › Náplň 800 ml (vhodná pro stolní přístroje Thed+, Thed)



BePro Odsávací systémy

Produkty BePro pro odsávací systémy slouží k čištění a dezinfekci odsávacích systémů (včetně odsávačů slin) a plivátek v zubní ordinaci.

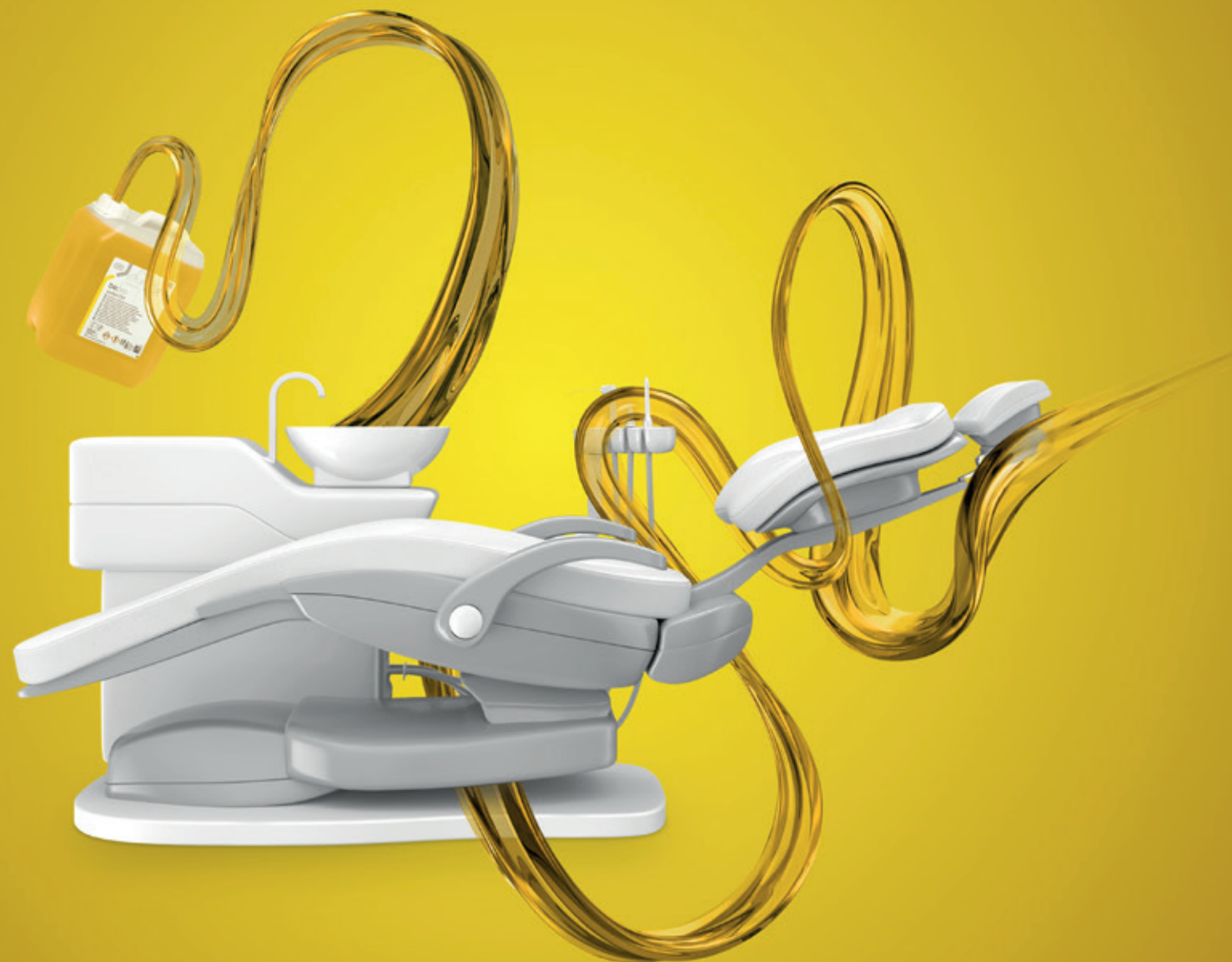

Čištění nezanechávající stopy

Tekuté koncentráty se zesíleným dezinfekčním účinkem se hodí k dennímu a týdennímu použití. Garantují čištění, které nezanechává stopy, a přitom dobře ničí patogenní mikroorganismy.



BePro Suction CD

Tekutý koncentrát se zesíleným dezinfekčním účinkem k dennímu čištění a péči o odsávací systémy s nebo bez odlučovače amalgámu v zubní ordinaci.

- › Neobsahuje vonné a barvicí látky
- › Vynikající snášenlivost s materiály

Složení

2-aminoethanol, trinitrium-nitrotriacetát, 2-propanol, benzalkoniumchlorid

V souladu s normami

EN 13727, EN 13624, EN 16777, certifikace VAH/DGHM

Spektrum účinnosti

Baktericidní, levurocidní, obalené viry, adenovirus, norovirus

Balení

› Kanystr 5 l



BePro Suction CM

Tekutý koncentrát k týdennímu kyselému kontra čištění a péči o odsávací systémy s nebo bez odlučovače amalgámu v zubní ordinaci.

- › Neobsahuje aldehyd, fenol a chlor
- › Vynikající snášenlivost s materiály

Složení

Kyselina amidosulfonová, QUAC, tenzidy

Balení

› Kanystr 5 l

BePro Péče o ruce

Neustálá ochrana a péče. Péče o pokožku a ruce od mytí až k závěrečné hydrataci představuje každodenní výzvu, při které je potřeba dbát na nezbytnou rovnováhu.



Čištění a péče

Produkty péče o pokožku BePro nabízí kompletní program na mytí rukou. Produkty jsou hygienicky nezávadné, šetrné pro ruce, dermatologicky testované a zajišťují optimální péči o ruce a zdraví pokožky.



BePro Hand Wash

Jemná mycí emulze pro časté mytí rukou. Čistí pokožku mimořádně šetrně. Obsahuje látky chránící pokožku k zachování přirozeného kyselého pláště na ochranu pokožky. BePro Hand Wash je pH neutrální a jemně voní.

- › Jemná mycí emulze
- › Obsahuje látky šetrné k pokožce
- › Maximálně efektivní z hlediska nákladů
- › Dermatologicky testováno

Oblast použití

Ideální pro použití ve všech zdravotnických oblastech, které vyžadují časté mytí rukou (EN 1499)

Balení

› Láhev 1 l s dávkovačem



BePro Hand Hygiene

Přípravek na hygienu rukou k čištění bez vody, s vitamíny, hydratačními látkami a anti-aging účinky.

- › Neobsahuje vonné a barvicí látky
- › Vynikající snášenlivost s pokožkou
- › S účinnými látkami proti stárnutí
- › Dermatologicky testováno

Složení u 100 g

52,8 g ethanolu, 19,0 g 1-propanolu, 2,8 g isopropanolu, hydratační a změkčující účinné látky, vitamín E acetát, panthenol a bisabolol

Balení

› Láhev 500 ml s dávkovačem



BePro Hand Protection

Ochranný bariérový krém k promaštění pokožky (emulze vody v oleji). Neobsahuje silikon, k použití při práci, která vyžaduje častý kontakt s produkty na vodní bázi, například s čistícími a dezinfekčními prostředky.

Ideální jako ochrana pokožky při nošení rukavic.

- › Neobsahuje vonné a barvicí látky
- › Vynikající snášenlivost s pokožkou
- › S účinnými látkami proti stárnutí
- › Dermatologicky testováno

Balení

› Tuba 100 ml



BePro Hand Lotion

Krém pro intenzivní péči a ochranu pokožky. BePro Hand Lotion se lehce nanáší, rychle se vstřebává a nemastí. Vhodný pro všechny typy pokožky.

- › Neobsahuje vonné a barvicí látky
- › Vynikající snášenlivost s pokožkou
- › S účinnými látkami proti stárnutí
- › Dermatologicky testováno

Použití

Po čištění/dekontaminaci rukou (pauzy/konec pracovní doby) naneste krém o velikosti pecky z třetiny na hřbety rukou a dobře vetřete


Balení

› Tuba 35 ml

W&H AIMS Bezpečnost především!

Hygiena má v zubní ordinaci zásadní význam. Společnost W&H vám s programem AIMS přináší široce diverzifikované produktové portfolio, základní poznatky a veškeré relevantní, přehledně uspořádané informace.

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich pacientů. **aims.wh.com**

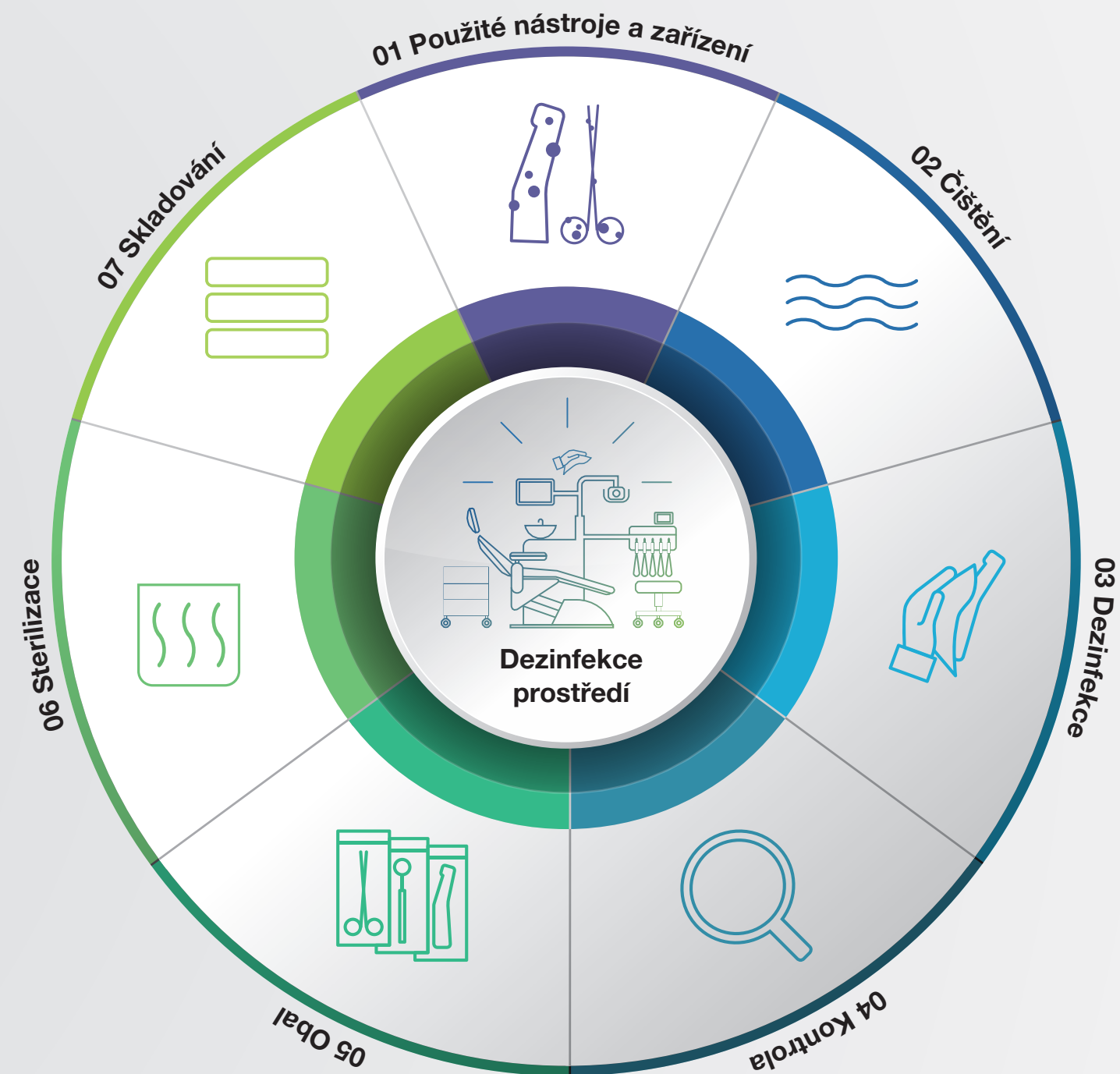

Dekontaminace



Čištění



Dezinfekce



Kontrola
a péče/údržba



Obal



Sterilizace



Možnost zpětného sledování
a skladování

BePro Příslušenství



BePro soaking bath

Odolná plastová nádoba pro dekontaminaci nástrojů ponořením.

BePro mini bath

Odolná plastová nádoba pro dekontaminaci rotačních nástrojů ponořením.

BePro otvírač kanystrů

Otvírač na 5litrové kanystry.

BePro kohoutek na kanystr

Kohoutek na 5litrové kanystry.

BePro dávkovací pumpa na kanystr

Dávkovací pumpa na 5litrové kanystry, dávkované množství 20 ml.

BePro dávkovací pumpa na láhve

Dávkovací pumpa pro láhev 1 l.

BePro směšovací nádoba pro odsávací systémy

Multifunkční směšovací nádoba na čištění a péči o odsávací systém na stomatologické soupravě.

BePro Přehled

Produktové portfolio BePro	Povrchy						Nástroje		Péče o ruce				Odsávací systémy		Automatické čištění nástrojů			
	Forma při dodání ⁽¹⁾	Neinvazivní zdravotnické prostředky	Stomatologické soupravy (vč. polstrovaných ploch)	Mobiliář	Malé plochy	Velké plochy	Nástroje	Rotální nástroje (např. vrtačky, pilníky)	Mytí	Asepsa	Ochrana	Péče	Čištění a dezinfekce	Čištění a péče	Tri-enzymatický čisticí prostředek	Lehce alkalický čisticí prostředek	Neutralizátor	Oplachování
BePro Wipes	PkP	●	●	●	●													
BePro Wipes (náplň)	PkP	●	●	●	●													
BePro Spray	PkP	●	●	●	●													
BePro Spray (náplň)	PkP	●	●	●	●													
BePro Disinfection Concentrate	kŘ				○	●												
BePro Disinfectant I	kŘ						●	○										
BePro Disinfectant R	PkP							●										
BePro Disinfectant R (náplň)	PkP							●										
BePro Hand Wash	PkP								●									
BePro Hand Hygiene	PkP									●								
BePro Hand Protection	PkP										●							
BePro Hand Lotion	PkP											●						
BePro Suction CD	kŘ												●					
BePro Suction CM	kŘ													●				
BePro Cleaner TE	kŘ														●			
BePro Cleaner MA	kŘ															●		
BePro Neutraliser C	kŘ																●	
BePro Rinse	kŘ																	●

⁽¹⁾ **PkP**: Připraveno k použití **kŘ**: K ředění • Doporučeno ○ Vhodné

Obr. fotografie symbolů. Doplňkové vybavení a obsah vyobrazených dílů příslušenství nejsou součástí dodávky.

Prodej:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

20574 ACZ Rev. 001 / 02.06.2025
Změny vyhrazeny