



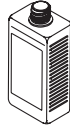

# assistina

## Týdenní kontrola


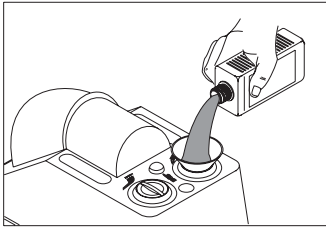


**Zkontrolujte množství kapaliny!  
Doplňte chybějící!**

Servisní olej  
500 ml – 02675910


Čistící tekutina  
1000 ml – 02680200

Set 02680500:  
1000 ml čisticí tekutiny a 500 ml servisního oleje

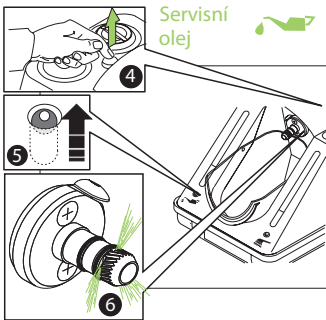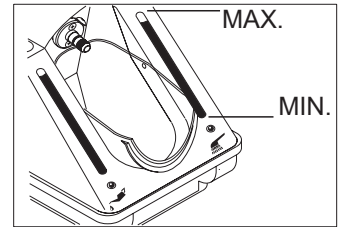


Servisní olej

**Zkontrolujte funkčnost!**

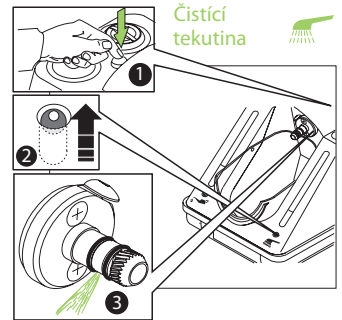

Čistící tekutina


**Zkontrolujte o-kroužky!  
Prověřte správnou pozici  
a / nebo  
poškození!**

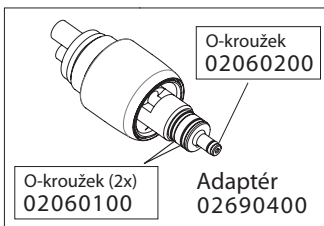

O-kroužek  
02060200

O-kroužek (2x)  
02060100

Adaptér  
02690400

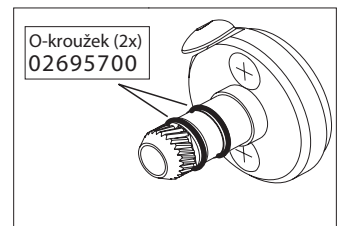



O-kroužek (2x)  
02695700

## Obecné rady


Při každé údržbě - Stiskněte tlačítko programu dvakrát!



**Ověřte pevnost připojení!**

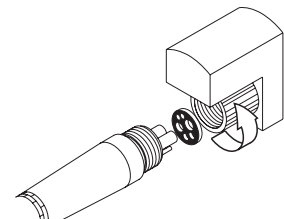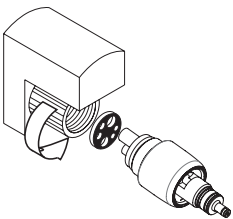


**Výměna filtrů!**

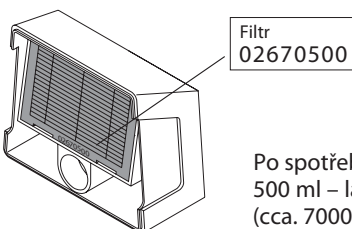

Filtr  
02670500

Po spotřebování jedné  
500 ml – lahve servisního oleje  
(cca. 7000 cyklů)

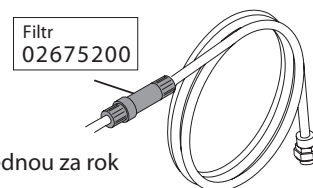

Filtr  
02675200

Jednou za rok

### VÝROBCE:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### PRODEJCE:

Denta servis, s.r.o.  
Rudolfovská tř. 476/111  
370 01 České Budějovice

t + 420 777 102 488  
t + 420 777 692 700  
info@dentaservis.cz  
www.dentaservis.cz