

Uživatelská příručka

**Název výrobku: Chemický indikátor pro kontrolu účinnosti sterilizace
v horkovzdušných sterilizátorech (dry heat indicator - DHI)**


Třída 4 dle ISO 11140-1

Katalogové číslo: W 3567

Postup při použití:

1. Indikátorový proužek vložte ke sterilizovanému zdravotnickému prostředku, umístěnému ve sterilizačním obalu a uložte do sterilizační komory.
2. Jestliže sterilizace proběhla za předepsaných podmínek, ověřte, zda indikátor (modrá šipka), má stejnou nebo tmavší barvu jako světle fialový referenční trojúhelník.
3. Barevná změna indikátoru: z modré na světle fialovou až světle hnědou.
4. V případě, že tomu tak není, je třeba materiál považovat za nesterilní a sterilizaci opakovat s novým indikátorovým proužkem.
5. Tento indikátor je určen pro kontrolu účinnosti sterilizace v horkovzdušných sterilizátorech s následujícími parametry sterilizačního procesu:

160°C / 60 min., 170°C / 30 min., 180°C / 20 min.
6. Provedení indikátoru umožňuje jeho snadnou archivaci.
7. Skladovací podmínky před i po sterilizaci jsou uvedeny na obalu. Indikátor neobsahuje těžké kovy.
8. Balení: 200 ks indikátorových proužků v papírové skládáče.

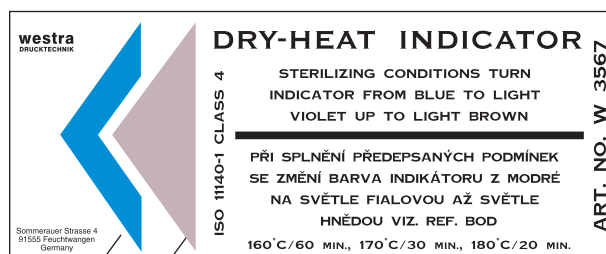

Indikátor Referenční trojúhelník

Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice

tel.: 385 342 762

fax: 385 345 013

e-mail: unibal@unibal.cz

06/2007